

睛靈義眼型隱形眼鏡

Smart Vision Prosthetic Contact Lens

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

本器材須經眼科醫師處方使用

鏡片規格

衛部醫器製字第 005142 號

材質	效能/特性	眼部美觀修飾	光學特性 / 規格	球面光度	0.00 D
	材質	Hema-copolymer 62%		瞳孔	黑色 ; 4.0~8.0mm
	含水量	38%		直徑	13.80 ~ 15.20 mm
	材質特性	親水性		中心厚度	0.060 ~ 0.180 mm
	配戴方式	日戴型 (最長 90 天)		基弧	8.4~9.2 mm
外觀規格	顏色	黑棕		可見光穿透率	< 50% (依瞳孔規格而定)
	包裝方式	PP 杯裝、VIAL 瓶裝			

用途：本產品可作為角膜、虹膜損傷異常的傷疤遮掩並提供恢復美觀之日戴型軟性隱形眼鏡。

禁忌症：眼角膜、結膜疾患者，乾眼症、水晶體或視網膜疾患者、前眼部急性或亞急性發炎、眼睛感染、葡萄膜炎、虹彩炎、眼瞼異常、角膜異常缺陷、過敏、長時間生活在乾燥環境、長時間生活在粉塵、藥品等環境，均不得配戴。

配戴說明：

1. 本產品作為軟性隱形眼鏡使用，每日配戴時間不得超過 12 小時，每日就寢前須取下鏡片作清潔保養，配戴使用週期由醫師指示。
2. 初次配戴者，開始配戴時間 4 小時，隨後每日增加 2 小時。
3. 屬每日拋棄式者，請每天更換新的鏡片(一旦摘下的鏡片，必須拋棄，不要重複配戴)。
4. 其他拋棄型式者，請確實遵照使用說明書進行清洗、清潔、保存、拋棄。

鏡片保養須知：每日清潔保養方法：

洗淨 → 保存

1. 將鏡片凹面向上放置於手心後，將適量隱形眼鏡專用洗淨液滴入手心中。
2. 用食指指腹輕揉鏡片正反面各 15-30 秒。
3. 洗淨後使用隱形眼鏡專用保存液或生理食鹽水將鏡片沖洗乾淨。
4. 用自來水清洗隱形眼鏡保存盒後，注入新鮮之隱形眼鏡專用保存液；再將鏡片正確的放入保存盒中，並將保存盒之蓋子確實旋緊並確認。
 - 注意：清洗鏡片時，勿以畫圓圈似之方式清洗鏡片，應朝手掌內側以單一方向輕揉（正反面皆同）。
 - 注意：請勿用力按壓鏡片或拉扯鏡片。
 - 注意：隱形眼鏡需在完全去除鏡片髒污狀態下以新的保存液保存鏡片；且時常以新的保存液保持鏡片的柔軟性及光學性。
 - 注意：保存盒的保存蓋上印有 R 及 L 的英文字母，請將左右鏡片正確放入保存盒中。
 - 注意：蓋子在旋緊時，要確認鏡片是否置妥於容器中。
 - 注意：鏡片保存盒蓋須常保持清潔及更換新保存液。

→ 請使用經由衛生福利部核准之隱形眼鏡清潔、保養用品；且確實遵照其指示，做好鏡片之清潔工作，確保眼睛健康。

警告注意事項：可見光穿透率依照瞳孔部規格和著色深度而會有最低 1%，當配戴本產品時，可能造成視力下降。請依照眼科醫師指示的使用環境和時機使用本器材。

使用注意事項：

- 配戴程序及時間請確實遵守，請使用正確的洗淨及保養方法。
- 保持手部及指甲之清潔，清潔時避免指甲刮傷鏡片。
- 就寢、洗澡前，請將隱形眼鏡取出。體育活動則事先請教眼科醫師建議。
- 配戴時勿造成隱形眼鏡的刮傷磨痕或破損，並應避免化粧品及噴霧狀之藥物等污染隱形眼鏡。
- 當鏡片乾澀或損壞時，須更換戴用新的隱形眼鏡。
- 如有使用抗生素、利尿劑、肌肉鬆弛劑、鎮定劑、抗暈劑或其它會引起眼睛乾澀、異物感、視力模糊等情況的藥物時，可使用軟性隱形眼鏡專用眼睛滋潤劑改善情況或停止配戴隱形眼鏡，但使用任何藥物前，均應先詢問眼科醫師。
- 注意眼部出現任何不適感或症狀應立即至眼科醫師處就診，也應定期接受眼科醫師檢查。
- 本器材須經眼科醫師處方使用。

藥商/製造廠名稱：視茂股份有限公司

藥商地址：新北市新莊區五權一路 13 號之 1

製造廠地址：新北市新莊區五權一路 13 號之 1(1F&2F)、13 號 5 樓之 3、13 號 7 樓之 2、13 號 8 樓之 3

配戴隱形眼鏡操作方式暨注意事項

【警告】

隱形眼鏡為直接配戴於眼角膜上之醫療器材，若不遵照鏡片使用方法或不遵守使用上的注意事項，會造成角膜潰瘍、角膜炎(含感染性角膜炎)、角膜浸潤、角膜糜爛、角膜水腫、結膜炎(含巨大乳突性結膜炎)、虹彩炎等傷害。這些傷害中，如果不盡快治療而置之不理，有可能致使眼睛失明。為了安全又正確地使用隱形眼鏡，務必詳閱原製造廠所提供之使用說明書，文字或內容文章有不清楚的地方，務必向眼科醫師詢問，並請妥善保留原製造廠所提供之使用說明書。

壹、軟式隱形眼鏡的處理方式

一、注意事項：

1. 初戴者，可從每天戴4至6小時開始，每日增加2小時。
2. 若有明顯不適之情形應儘早回診檢查，一切正常則應於一星期後回診。
3. 戴上鏡片後再化妝，摘下鏡片後再卸妝。
4. 必須知道清潔液、生理食鹽水、保存液、酵素液或酵素片的功用，開瓶後保存期限以仿單內之規定為準。
清潔液-清洗鏡片，生理食鹽水-沖洗鏡片，保存液-浸泡及消毒鏡片，酵素液-去蛋白。
5. 瓶蓋要朝上或側放，不得朝下擺放，以避免污染。
6. 固定先摘戴一眼，再摘戴另一眼(如先右後左)，以免鏡片左右顛倒。
7. 摘鏡片的食指、拇指指甲須剪短，以免摘鏡片時傷到眼球或隱形眼鏡。
8. 戴鏡片時要先分辨鏡片的正(如碗狀)反(如碟狀)面。
9. 所有與隱形眼鏡相關的物品，如鏡片、水盒或藥水等，不得擺放在潮濕處，如浴室。

二、鏡片配戴方法：

1. 用中性肥皂清洗雙手，再擦乾雙手。
2. 將鏡片置於右手食指指腹尖端，正面朝上。
3. 以右手中指拉開下眼皮，左手中指拉開上眼皮。
4. 兩眼直視前方，再將鏡片移至於黑眼珠上。
5. 確認鏡片已戴上，輕轉眼球，再慢慢鬆開雙手。
6. 若鏡片掉落地面或桌面，用姆指及食指抓取其邊緣即可取起。須重新洗乾淨、浸泡、消毒後再戴上(確定正反面)。

三、鏡片卸取方法：

1. 眼睛正視前方。
2. 以右手中指拉開下眼皮，左手中指拉開上眼皮。
3. 以右手拇指及食指指腹尖端，輕置於鏡片下緣。
4. 兩指合攏，輕輕取下鏡片。
5. 若鏡片掉落地面或桌面，用姆指及食指抓取其邊緣即可取起。

四、鏡片的清洗及保養方式：

1. 將鏡片放在左手掌心，清潔液搖勻後，倒一或二滴在鏡片上。
2. 以右手食指指腹，將鏡片呈放射狀向外搓揉20秒至30秒左右。
3. 以生理食鹽水將鏡片沖洗乾淨。
4. 將洗淨的鏡片分別置入水盒中(約七分滿的新鮮保存液)，浸泡6小時以上，才可取戴。

五、水盒的保養方式：

1. 每次使用後，以清水沖洗乾淨，再用力甩乾後放置陰乾。
2. 一星期消毒一次。用牙刷沾點"洗碗精"刷洗水盒凹槽處，再用熱水沖淋乾淨、放置陰乾即可。建議每三個月換新水盒。

六、酵素片的使用方法：

1. 水盒中注入生理食鹽水，左右各投入一片酵素片，待其完全溶解。
2. 事先以清潔液清洗鏡片，再用生理食鹽水沖淨。
3. 浸泡在酵素溶液中約30分鐘(不可超過2小時)。
4. 取出鏡片，用清潔液清洗，再用生理食鹽水沖淨。
5. 浸泡在新鮮的保存液中6小時以上，才可取戴。

貳、透氣硬式隱形眼鏡的處理方式

一、注意事項：

1. 請依照醫師指示定期回診。
2. 瞭解清潔液、生理食鹽水、保存液及酵素液的功用，並依照仿單內之方法進行清洗及消毒。
3. 瓶蓋要朝上或側放，不得朝下擺放或觸摸瓶口，用完立即蓋妥，以避免細菌污染。(藥水開封後限使用一個月，過期請換新)
4. 所有與隱形眼鏡相關的物品，如鏡片、水盒或藥水，不得擺放在潮濕處，如浴室。
5. 食指、拇指指甲須剪短，以免摘鏡片時傷到眼球或隱形眼鏡。

二、鏡片配戴方法：

1. 用中性肥皂清洗雙手，再用擦手紙將手擦乾。

2. 將鏡片置於右手食指尖端指腹，正面朝上。
3. 以右手中指拉開下眼皮，左手中指拉開上眼皮，將鏡片輕輕放角膜中央。
4. 確認鏡片已戴上，再慢慢鬆開雙手。

三、鏡片卸取方法：

〈雙手摘法〉

1. 眼睛直視鏡中。
2. 右手中指平按著下眼皮，固定鏡片下緣(勿太用力，以避免眼皮外翻)；左手中指平按著上眼皮，固定鏡片上緣。
3. 眼皮輕眨，鏡片會向下翻落。(注意以手接住)
4. 鏡片掉落地面或桌面上，切勿直接抓取，以免磨損鏡片表面。應該以紙片插入鏡片下面，或加水使鏡片浮起，再行撈起。

〈單手摘法〉

1. 將下巴稍為縮緊，眼睛張大，正視鏡中。
2. 以食指固定上眼皮，同一手中指固定下眼皮。(若眼睛無法張大，可用食指及中指將上、下眼皮稍微撐開)
3. 兩隻手指往外眼角斜上方拉(要有"緊"的感覺)，此時眼睛持續張大，再往鼻樑的方向看，鏡片會自然的被"推擠"出來。(注意以另一手接住)

〈吸棒摘法〉

1. 眼睛正視前方。
2. 以左手食指將上眼皮撐開，右手中指將下眼皮拉下。
3. 擠壓吸棒尾端，將吸盤覆上鏡片表面，放鬆擠壓以形成負壓將鏡片吸住。摘出鏡片後，再擠壓吸棒尾端，可除去負壓，取下鏡片。
4. 請務必確定鏡片位置，才可將吸棒吸附上去，以避免吸到眼球。
5. 吸棒摘取鏡片的方式很簡單，但請不要過度依賴它，最好學會徒手摘。

四、鏡片移位的處理方法：

1. 正視前方，眼球不要亂轉。
2. 用手摸眼皮或將眼皮撥開，確定鏡片的位置。(例：右下角)
3. 眼睛先往鏡片相反的方向看。(例：左上角)
4. 手指抵著鏡片外緣(右下角外)，眼睛看回鏡片原先的方向(右下方)。
5. 鏡片回到黑眼球中間，才可摘下鏡片。
6. 若鏡片無法以上述方式移回黑眼珠，待確定位置後可用吸棒吸取。

五、隱形眼鏡水盒的保養方式：

1. 每次使用後，用自來水沖洗，再用力甩乾後放置陰乾。
2. 一星期消毒一次。用牙刷沾點"洗碗精"刷洗水盒凹槽處，再用熱水沖淋乾淨再放置陰乾。建議每三個月換新水盒。

* 另有高溫消毒及雙氧水消毒法，以遵照仿單之規定為準。

【禁忌及禁止】

配戴隱形眼鏡者，需依照當下的眼睛或身體的疾病、生活習慣或生活環境的情況，有可能需暫時停止使用隱形眼鏡。請務必經過眼科醫師的診察，確認無礙於疾病及環境後，再使用隱形眼鏡。

禁忌：●前眼部急性或亞急性發炎●眼睛感染●葡萄膜炎●眼瞼異常●角膜知覺低下●角膜上皮缺陷●乾眼及淚管缺陷●過敏●長時間生活在乾燥環境●長時間生活在粉塵、藥品等環境●其他不適合配戴隱形眼鏡者

【注意】

- 隱形眼鏡，請於醒著的時候使用，睡前請摘下。
- 屬每日拋棄式者，請每天更換新的鏡片(一旦摘下的鏡片，必須拋棄，不要重複配戴)。
- 其他型式者，請確實遵照原製造廠所提供之使用說明書進行清洗、清潔、保存、拋棄。
- 當配戴中鏡片破損時，請盡快找眼科醫師診治。
- 請不要使用有破損的鏡片。
- 請遵照鏡片更換頻率。
- 請遵照鏡片配戴時間，不要逾時配戴。
- 隱形眼鏡配戴時間因個人體質而不同，請務必遵照眼科醫師指示。
- 請定期做眼睛檢查。
- 當眼睛感到異常時，請盡快向眼科醫師診治。

【戴隱形眼鏡的危險】

在正確使用隱形眼鏡之下，仍然有可能使角膜內皮細胞減少等生理變化，或因戴隱形眼鏡的關係，鏡片使眼睛氧氣供應量降低，造成角膜上皮受傷或角膜新生血管等眼睛傷害的危險。為不致產生更嚴重的眼科疾病，有任何不適，請及早尋找眼科醫師診治，並定期檢查。